



COMPOSITI COMPOSITES


GC




COMPOSITI-COMPOSITES

GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Sottoposto a controlli continui per garantire una perfetta aderenza e resistenza quando si applica su metallo, ceramica o plastica. Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.


GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Comprobado continuamente para garantizar una adhesión y resistencia perfectas cuando se aplica sobre metal, cerámica o plástico. Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para pegar.

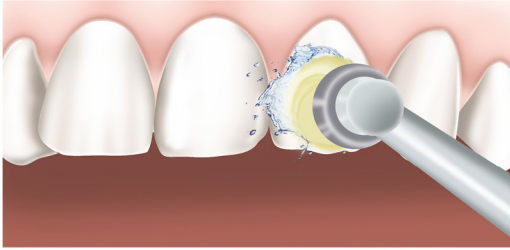


1) Pulire le superfici dei denti con pomice e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua. - 1) Limpiar las superficies de los dientes con piedra pómez y agua, aclarar abundantemente con agua.

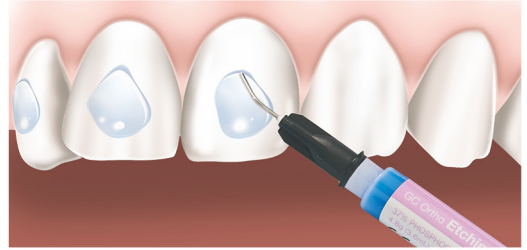


2) Applicare sulla superficie dei denti GC Ortho Etching Gel per 30 secondi, risciacquare e asciugare. - 2) Aplique GC Ortho Etching Gel en la superficie de los dientes durante 30 segundos, enjuague y seque.

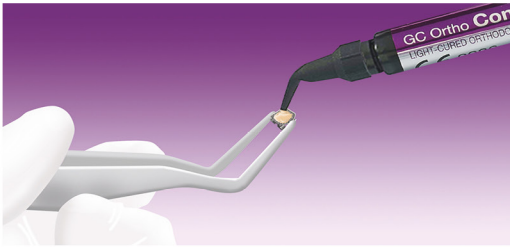

3) Applicare sulla base del bracket la pasta adesiva GC Ortho Connect. 3) Aplique la pasta adhesiva GC Ortho Connect a la base del Bracket.

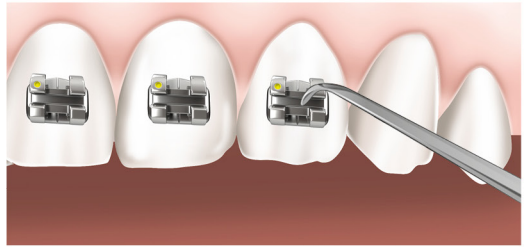

4) Posizionare i brackets sulle superfici dei denti. 4) Coloque los brackets en las superficies de los dientes.

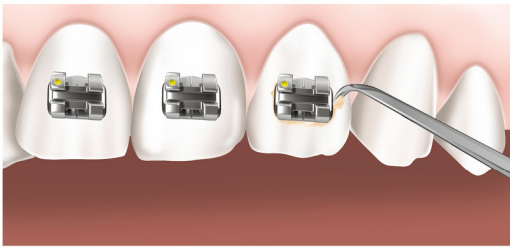

5) Se necessario rimuovere il composito in eccesso. 5) Si es necesario, elimine el exceso de comosite.



6) Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a Led per 10 secondi sia mesialmente che distalmente su ogni bracket. - 6) Utilice una lámpara de polimerización LED durante 10 segundos tanto en sentido mesial como distal en cada bracket.

COMPOSITI-COMPOSITES

GC Fuji ORTHO™

GC Fuji ORTHO LC è un cemento vetroionomerico rinforzato con resina, particolarmente adatto per l'adesione di bracket, bande e dispositivi ortodontici. La possibilità di applicazione in presenza di umidità senza necessità di mordenzatura con acido fosforico semplifica la procedura di adesione. La sua formulazione unica contribuisce a ridurre il rischio di decalcificazione, aiutando a mantenere la salute dello smalto.

GC Fuji ORTHO LC es un cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina, especialmente adecuado para unir brackets, bandas y dispositivos de ortodoncia. La posibilidad de aplicación en presencia de humedad sin necesidad de grabado con ácido fosfórico simplifica el procedimiento de unión. Su fórmula única ayuda a reducir el riesgo de descalcificación, ayudando a mantener la salud del esmalte.



| Contenuto-Contenido | Cod. |
|--|--------|
| Intro Pack: 15 g di polvere, 6,8 ml di liquido-Paquete de introducción: 15 g de polvo, 6,8 ml de líquido | 000027 |





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es