



COMPOSITI COMPOSITES


GC




COMPOSITI-COMPOSITES

GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Sottoposto a controlli continui per garantire una perfetta aderenza e resistenza quando si applica su metallo, ceramica o plastica. Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.


GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Comprobado continuamente para garantizar una adhesión y resistencia perfectas cuando se aplica sobre metal, cerámica o plástico. Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para pegar.

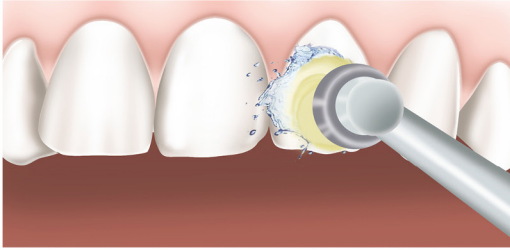


1) Pulire le superfici dei denti con pomice e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua. - 1) Limpiar las superficies de los dientes con piedra pómez y agua, aclarar abundantemente con agua.

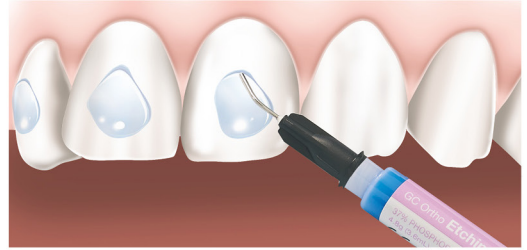


2) Applicare sulla superficie dei denti GC Ortho Etching Gel per 30 secondi, risciacquare e asciugare. - 2) Aplique GC Ortho Etching Gel en la superficie de los dientes durante 30 segundos, enjuague y seque.

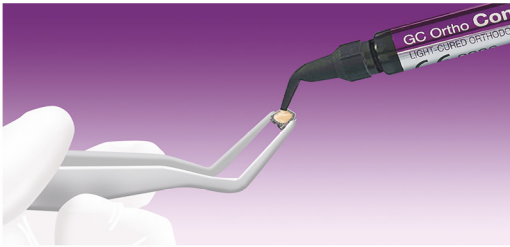

3) Applicare sulla base del bracket la pasta adesiva GC Ortho Connect. 3) Aplique la pasta adhesiva GC Ortho Connect a la base del Bracket.

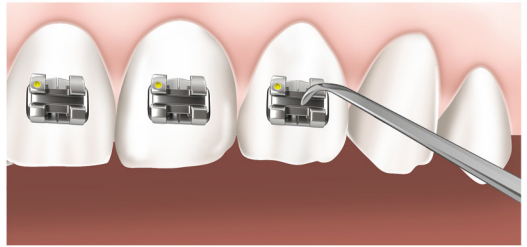

4) Posizionare i brackets sulle superfici dei denti. 4) Coloque los brackets en las superficies de los dientes.

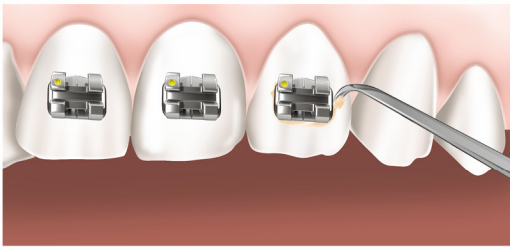

5) Se necessario rimuovere il composito in eccesso. 5) Si es necesario, elimine el exceso de comosite.



6) Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a Led per 10 secondi sia mesialmente che distalmente su ogni bracket. - 6) Utilice una lámpara de polimerización LED durante 10 segundos tanto en sentido mesial como distal en cada bracket.

COMPOSITI-COMPOSITES

Linea di prodotti-*Línea de producto* Tooth Mousse & MI Paste Plus



Tooth Mousse è il modo ideale per dare ai vostri pazienti la massima protezione completa. Grazie a Recaldent™ * Ingrediente rivoluzionario!

Tooth Mousse è una crema remineralizzante a base di CPP-ACP (caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo)

Con il passare del tempo, i denti perdono elementi costitutivi e forza a causa di trattamenti di sbiancamento, assunzione di cibi o bevande ad elevato contenuto di acidi, situazione fisiologiche o patologiche sottrattive di calcio o per il naturale processo di invecchiamento. Fenomeni che si manifestano spesso con la sensibilità dentale. Per questo è importante proteggere e rivitalizzare i denti per fare in modo che si conservino sani per tutta la vita. Il complesso di CPP-ACP è in grado di contrastare gli attacchi acidi e trasportare ioni calcio e fosfato sullo smalto in una forma altamente assorbibile. Questo meccanismo assicura il contrasto della demineralizzazione e al contempo la remineralizzazione della struttura dentale rendendola più resistente.

*Tooth Mousse es la forma ideal de brindar a sus pacientes la máxima protección completa. ¡Gracias a Recaldent™ * ingrediente revolucionario!*

Tooth Mousse es una crema remineralizante a base de CPP-ACP (fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo).

Con el paso del tiempo, los dientes pierden elementos constituyentes y fuerza debido a los tratamientos de blanqueamiento, la ingesta de alimentos o bebidas con alto contenido ácido, condiciones fisiológicas o patológicas que restan calcio o por el proceso natural de envejecimiento. Fenómenos que ocurren a menudo con la sensibilidad dental. Por eso es importante proteger y revitalizar sus dientes para garantizar que permanezcan sanos de por vida. El complejo CPP-ACP es capaz de contrarrestar los ataques de los ácidos y transportar iones de calcio y fosfato sobre el esmalte en una forma altamente absorbible. Este mecanismo asegura el contraste de desmineralización y al mismo tiempo la remineralización de la estructura, dental haciéndolo más resistente.

* Recaldent™ is a trademark of Cadbury Enterprises Pte Ltd.

I vantaggi di GC Mousse Tooth sono:

- Sostiene una maggiore resistenza agli attacchi acidi inibendo la demineralizzazione dello smalto e inducendo la remineralizzazione alla superficie e sotto superficie del dente
- Aiuta a ridurre al minimo la sensibilità del dente otturando i tubuli dentinali aperti
- Previene la formazione di cavità iniziali grazie alle sue proprietà anti-cariogeniche
- Inverte il processo di lesione e smacchia i denti, anche dopo un trattamento ortodontico
- *Apoya una mayor resistencia a los ataques ácidos al inhibir la desmineralización del esmalte e inducir la remineralización en la superficie y debajo de la superficie del diente.*
- *Ayuda a minimizar la sensibilidad dental al llenar los túbulos dentinarios abiertos*
- *Previene la formación de caries iniciales gracias a sus propiedades anticariogénicas*
- *Invierte el proceso de lesión y mancha los dientes, incluso después de un tratamiento de ortodoncia*

GC Tooth Mousse (40g, 35 ml per tubo)	Cod.
Confezione assortita 5 pz., 1 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia) <i>Confezione assortita 5 pz., 1 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)</i>	10003205
Confezione assortita 10 pz., 2 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia) <i>Confezione assortita 10 pz., 2 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)</i>	10001743
Fragola, confezione da 10 pz.- <i>Fresa, paquete de 10 pz.</i>	10001745
Melone, confezione da 10 pz.- <i>Melón, paquete de 10 pz.</i>	10001746
Menta, confezione da 10 pz.- <i>Menta, paquete de 10 pz.</i>	10001747
Tutti-Frutti, confezione da 10 pz.- <i>Tutti-Frutti, paquete de 10 pz.</i>	10001748
Vaniglia, confezione da 10 pz.- <i>Vainilla, paquete de 10 pz.</i>	10001744





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es