



COMPOSITI COMPOSITES


GC




COMPOSITI-COMPOSITES

GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Sottoposto a controlli continui per garantire una perfetta aderenza e resistenza quando si applica su metallo, ceramica o plastica. Con GC Ortho Connect, non è necessario applicare l'adesivo sul dente, poiché è già incorporato nella pasta. Una semplice mordenzatura dello smalto seguita da asciugatura è sufficiente per preparare l'attacco o il tubo buccale per l'incollaggio.


GC Ortho Connect™ Light Cured Adesivo Comprobado continuamente para garantizar una adhesión y resistencia perfectas cuando se aplica sobre metal, cerámica o plástico. Con GC Ortho Connect, no es necesario aplicar el adhesivo al diente, ya que ya está incrustado en la pasta. Un simple grabado del esmalte seguido de un secado es suficiente para preparar el accesorio o el tubo bucal para pegar.

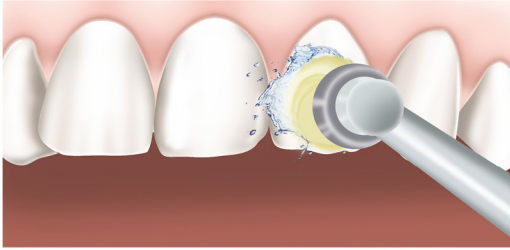


1) Pulire le superfici dei denti con pomice e acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua. - 1) Limpiar las superficies de los dientes con piedra pómez y agua, aclarar abundantemente con agua.

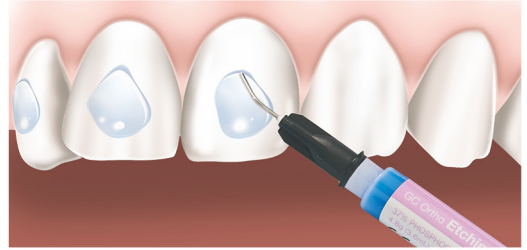


2) Applicare sulla superficie dei denti GC Ortho Etching Gel per 30 secondi, risciacquare e asciugare. - 2) Aplique GC Ortho Etching Gel en la superficie de los dientes durante 30 segundos, enjuague y seque.

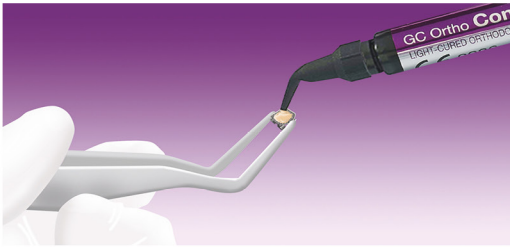

3) Applicare sulla base del bracket la pasta adesiva GC Ortho Connect. 3) Aplique la pasta adhesiva GC Ortho Connect a la base del Bracket.

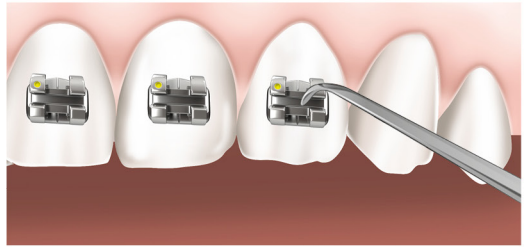

4) Posizionare i brackets sulle superfici dei denti. 4) Coloque los brackets en las superficies de los dientes.

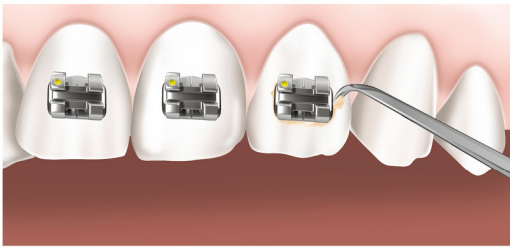

5) Se necessario rimuovere il composito in eccesso. 5) Si es necesario, elimine el exceso de composite.



6) Utilizzare una lampada fotopolimerizzante a Led per 10 secondi sia mesialmente che distalmente su ogni bracket. - 6) Utilice una lámpara de polimerización LED durante 10 segundos tanto en sentido mesial como distal en cada bracket.

COMPOSITI-COMPOSITES

Combinando la Remineralizzazione e la Fluoridazione, ecco quali sono i vantaggi Di GC MI Paste Plus TM:

Combinando Remineralización y fluoración, estas son las ventajas de GC MI Paste Plus TM:

MI Paste Plus offre tutti i benefici di Tooth Mousse, ha lo stesso sapore e in più ottimizza il rilascio e l'assorbimento di fluoro sullo smalto. MI Paste Plus contiene 900 parti per milione (ppm) di ioni di fluoro. MI Paste Plus con ACP(F) rilascia tutti e tre gli ioni necessari per formare fluorapatite resistente agli acidi tramite i due processi di remineralizzazione e fluorizzazione.

MI Paste Plus ofrece todos los beneficios de Tooth Mousse, tiene el mismo sabor y además optimiza la liberación y absorción de flúor en el esmalte. MI Paste Plus contiene 900 partes por millón (ppm) de iones de flúor. MI Paste Plus con ACP (F) libera los tres iones necesarios para formar fluorapatita resistente a los ácidos a través de los dos procesos de remineralización y fluoración.



GC MI Paste Plus (40g, 35 ml per tubo)	Cod.
Confezione assortita 5 pz., 1 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia) <i>Paquete surtido 5 uds., 1 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)</i>	10003270
Confezione assortita 10 pz., 2 di ogni sapore (Melone, Fragola, Tutti-Frutti, menta e vaniglia) <i>Paquete surtido 10 uds., 2 de cada sabor (Melón, Fresa, Tutti-Frutti, menta y vainilla)</i>	10001749
Fragola, confezione da 10 pz. - <i>Fresa, paquete de 10 pz.</i>	10001751
Melone, confezione da 10 pz. - <i>Melón, paquete de 10 pz.</i>	10001752
Menta, confezione da 10 pz. - <i>Menta, paquete de 10 pz.</i>	10001750
Tutti-Frutti, confezione da 10 pz. - <i>Tutti-Frutti, paquete de 10 pz.</i>	10001754
Vaniglia, confezione da 10 pz. - <i>Vainilla, paquete de 10 pz.</i>	10001753





Ortospecialized S.r.l.

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino

Tel. +39 055 430351

info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it



Ortospecialized Spain SL

GC Orthodontics esclusivist

Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria, 56, 1º, 1ª- 0809 Barcelona

Tel. +34 936 316 849

info@ortospecialized.es - www.ortospecialized.es